

BRUKSANVISNING DROGTESTER

Kontrollera urinprovets temperatur och färg. När urinprovet är godkänt öppnar man förpackningen drogtestet ligger i.

Se till att förpackningen är hel och kontrollera bäst före datum.


Öppna förpackningen när det är dags att doppa ner det i urinprovet.




Se till att teststickan och urinprovet håller en temperatur mellan 15-30 °C (rumstemperatur) före testning.

1. Öppna drogtestet och använd det så snart som möjligt. Ta av locket och doppa stickornas ändrar i urinprovet i cirka 10-15 sekunder. Doppa stickan ner till markeringen.
2. Sätt tillbaka locket på testet.
3. Lägg gärna testet plant i väntan på avläsningsresultat. Resultatet ska kontrolleras efter 5 minuter. Tolka inte resultatet efter 10 minuter.

Negativt Resultat:

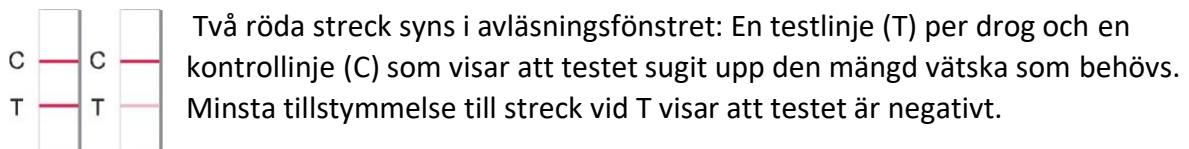

Positivt Resultat

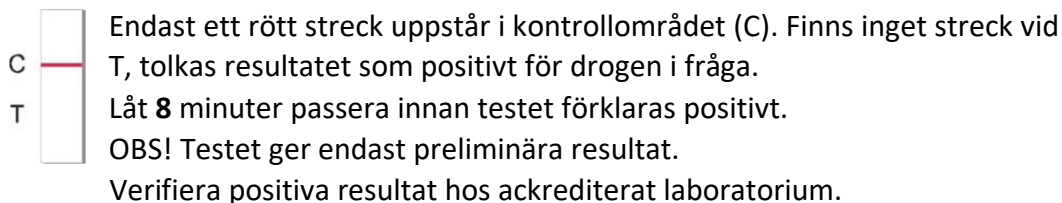

Ogiltigt Resultat



Om strecket vid C inte kommer fram kan detta bero på: otillräcklig mängd urin har sugits upp i remsan, felaktigt förvarat, för gammalt test eller handhavande fel. Kontakta Ljung & Sjöberg så hjälper vi er.