



BRUKSANVISNING Multi DROGTEST


Kontrollera urinprovets temperatur och färg. När urinprovet är godkänt öppnar man förpackningen drogtestet ligger i. Testet skall användas inom 60 min från att förpackningen öppnats. Se till att förpackningen är hel och kontrollera bäst före datum.

Öppna förpackningen när det är dags att doppa ner det i urinprovet.

Se till att teststickan och urinprovet håller en temperatur mellan 15-30 °C (rumstemperatur) före testning.

1. Öppna drogtestet och använd det så snart som möjligt. Ta av locket och doppa stickornas ändrar i urinprovet i cirka 10–15 sekunder. Doppa stickan ner till markeringen.
2. Sätt tillbaka locket på testet.
3. Lägg gärna testet plant i väntan på avläsningsresultat. Resultatet ska kontrolleras efter 5 minuter. Tolka inte resultatet efter 10 minuter.

Negativt Resultat:

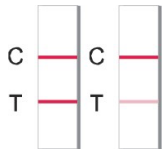

Två röda streck syns i avläsningsfönstret: En testlinje (T) per drog och en kontrollinje (C) som visar att testet sugit upp den mängd vätska som behövs. Minsta tillstymmelse till streck vid T visar att testet är negativt.

Positivt Resultat



Endast ett rött streck uppstår i kontrollområdet (C). Finns inget streck vid T, tolkas resultatet som positivt för drogen i fråga.

Låt **7-8** minuter passera innan testet förklaras positivt. Tänk på att minsta tillstymmelse till streck ska tolkas som ett streck.

OBS! Testet ger endast preliminära resultat.

Ogiltigt Resultat



Om strecket vid C inte kommer fram kan detta bero på: otillräcklig mängd urin har sugits upp i remsan, felaktigt förvarat, för gammalt test eller handhavande fel. Tänk på att minsta tillstymmelse till streck ska tolkas som ett streck. Kontakta Ljung & Sjöberg så hjälper vi er.