

Bruksanvisning Saliv ST-7

AMP 50ng/ml, MET 50ng/ml, THC 25ng/ml, COC 30ng/ml, TML 30ng/ml, OPI 40ng/ml, BZD 20ng/ml.



Se till att testen håller rumstemperatur (15-30 Celcius) innan provtagningen påbörjas. Provlämnaren ska inte haft något i munhålan på minst 10 min.

1. Ta upp svabben och lämna den till provlämnaren.
2. Be provlämnare köra svabben mot insidan av kinderna, gommen och på/under tungan. (se bild 1)
3. När indikatorn (se bild 2 nedan) visar färg är provtagningen klar. Om inte färg uppkommer på 7 min. ta ut svabben ur munnen.
4. Sätt svabben i hålet på behållaren, tryck till och skruva fast locket på svabben i behållaren. (Se bild 3)
5. Testet ska stå upprätt. Läs av enligt nedan efter 10 min. ej efter 20 min



Bild 1.



Bild 2.

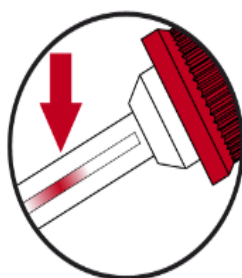


Bild 3.



- Tydliga resultat på 10 min
- Hög sensitivitet samt specificitet
- Produkten är lämplig för screening av saliv
- Certifikat samt godkännande för produkten: Certifikat: ISO 9001, ISO 13485. IVD i enlighet med 98/79/EC
- Individuellt förpackade i en foliepåse för att säkerställa hög kvalitet till sista förbrukningsdagkvalitet