

S-AMP-BESLAG / S-MET-BESLAG / S-BUP-BESLAG / S-FYL-BESLAG / S-LSD-BESLAG / S-CAT-BESLAG
S-TML-BESLAG / S-PGB-BESLAG / S-KET-BESLAG

I kittet finns Biotest, mugg, buffertlösning, pipett, sked och bomullstops.

1. Börja med att ta ytterst lite av fyndet. Är det tabletter, fasta beslag eller pulver använder ni sked eller bomullstops. Är det vätska, sug upp med pipetten.
2. Öppna behållaren med buffertlösning och häll över i muggen.
3. Rutin vid sked/bomullstops:
Ta bomullstopsen eller skeden som har partiklar/pulver på sig och doppa ner i buffertlösningen. Rör om med bomullstopsen/skeden, se till att det blandas väl.

Rutin vid pipett:
Innehållet i pipetten töms ner i muggen med buffertlösningen, se till att det blandas väl.
4. Öppna LS Biotest, ta av locket och doppa ner stickans ände i buffertlösningen.
5. Se till att LS Biotest suger upp buffertlösningen i rutan.
Sätt sedan tillbaka locket på LS Biotest.
6. Läs av inom 10 minuter.

